



Istruzioni per l'uso

Monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa


1 Sicurezza

2 Hardware

3 Software

4 Igiene

Parte 4: Igiene e disinfezione per custo screen 300/310/400/pediatric

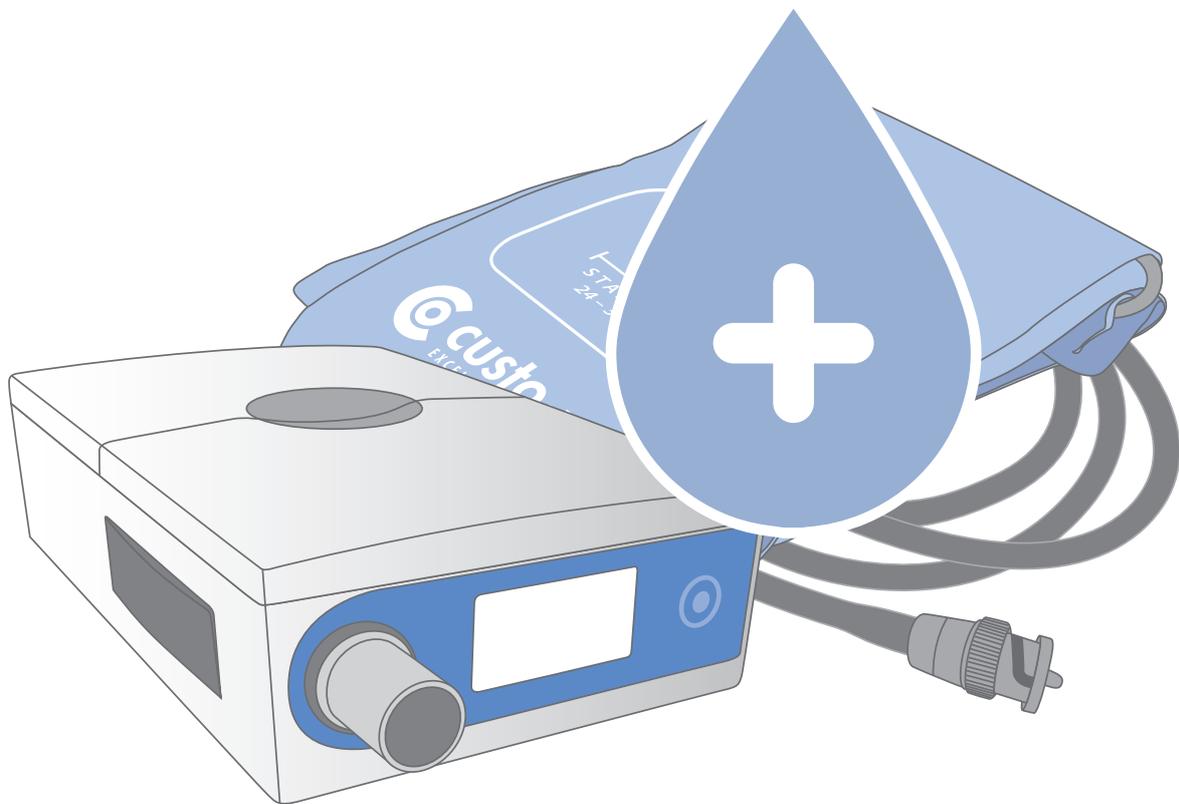

Caratteristiche:

Per il monitoraggio
pressione automatico
fino a 72 ore

MHY 0003 – DK 1704
Versione 002 – 09/03/2020

CE 0123

 **custo·med**
EXCELLENCE IN DIAGNOSTICS



© 2020 custo med GmbH

Facciamo presente che, senza previa autorizzazione scritta di custo med GmbH, le presenti istruzioni per l'uso non possono essere né parzialmente né completamente copiate, in altri modi riprodotte o tradotte in altre lingue.

Il produttore si riserva il diritto di modificare quanto indicato in queste istruzioni per l'uso senza previo avviso. La versione attuale può essere scaricata dalla nostra pagina web: www.customed.de.

ATTENZIONE:

queste istruzioni per l'uso fanno parte di un sistema modulare, composto da quattro parti. Per essere in possesso delle istruzioni per l'uso complete, è necessario scaricare da internet o dal CD tutte e quattro le parti.



Istruzioni per l'uso

Monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa

1 Sicurezza

2 Hardware

3 Software

4 Igiene

Parte 4: Igiene e disinfezione per custo screen 300/310/400/pediatric

Indice

4.1	Note importanti.....	4
4.2	Preparazione igienica del dispositivo MAPA custo med e accessori	
4.2.1	custo screen 300/310/400/pediatric.....	5
4.2.2	Borsa per il trasporto e cintura.....	5
4.2.3	Bracciale mis. pressione sanguigna.....	5
4.3	Detergenti e disinfettanti consigliati.....	6
4.4	Smaltimento dei materiali di consumo contaminati.....	6
	Panoramica della pulizia.....	7

4.1 Note importanti

Utilizzare soltanto detergenti e disinfettanti consigliati da custo med. Prodotti non adatti possono danneggiare il dispositivo.

In nessun caso i dispositivi possono essere immersi in liquidi o bagnati eccessivamente per la pulizia. I detergenti e i disinfettanti non devono essere spruzzati direttamente sul o dentro al dispositivo. L'umidità non deve penetrare all'interno dei dispositivi (ad es. attraverso i contatti dell'interfaccia).

I contatti non devono essere sporcati o danneggiati.

Pulire e disinfettare i dispositivi a ogni cambio di paziente. Assicurarsi che all'esterno i dispositivi siano sempre gradevoli alla vista e puliti.

Il dispositivo non deve essere collegato a una fonte di alimentazione elettrica durante la pulizia e la disinfezione.

4.2 Preparazione igienica del del dispositivo MAPA custo med e accessori

4.2.1 custo screen 300/310/400/pediatric

- Tipo di trattamento: disinfezione con panno

4.2.2 Borsa per il trasporto e cintura

- Tipo di trattamento: lavaggio disinfettante in sacchetto di lavaggio

4.2.3 Bracciale mis. pressione sanguigna

- Tipo di trattamento: disinfezione con panno

NOTA: si prega di osservare le informazioni sul foglietto illustrativo del bracciale per la pressione sanguigna.

- Procedura di pulizia e disinfezione:
Pulire il bracciale con un panno umido.
Se necessario, rimuovere la camera d'aria e lavare il rivestimento con del sapone o una soluzione disinfettante.
Dopo la disinfezione sciacquare il bracciale con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria.
- Procedura di sterilizzazione:
Il bracciale può essere sterilizzato a gas con ossido di etilene (EtO).
Dopo la sterilizzazione le parti esposte all'EtO devono essere ventilate.
Rispettare assolutamente tutte le norme e le precauzioni di sicurezza a tale proposito. Non autoclavare mai.

ATTENZIONE! Il tubo del bracciale, soprattutto la presa BNC, non deve essere immerso in nessun caso in liquidi.

4.3 Detergenti e disinfettanti consigliati

Disinfezione con panno:

- Meliseptol® Wipes sensitive (B.Braun)
- Meliseptol® Foam pure (B.Braun), utilizzare con un panno morbido senza pelucchi
- Si prega di osservare le indicazioni del produttore.

Lavaggio disinfettante:

- Eltra 40® Extra (ECOLAB)
- Si prega di osservare le indicazioni del produttore.



Lavaggio a macchina a 40°C in sacchetto di lavaggio (non centrifugare)



Non trattare con agenti chimici corrosivi o candeggina



Non stirare



Non asciugare nell'asciugatrice

I disinfettanti raccomandati possono essere sostituiti da prodotti di altri produttori, a condizione che siano equivalenti in termini di disinfezione e compatibilità dei materiali. Per l'igiene e la disinfezione rivolgersi al partner commerciale più vicino.

Ulteriori mezzi per la preparazione del bracciale misurazione pressione sanguigna

- Cidex, Sporicidin, Microzid, alcool isopropilico al 70 %, etanolo al 70 %, Buraton liquido
- Si prega di osservare le indicazioni del produttore.

4.4 Smaltimento dei materiali di consumo contaminati

I materiali di consumo contaminati, ad es. gli elettrodi adesivi (prodotti monouso) sono rifiuti soggetti a disposizioni speciali di raccolta e smaltimento ai fini della prevenzione delle infezioni. Devono essere smaltiti in modo sicuro e adeguato. Osservare la legge sulla prevenzione delle infezioni e le disposizioni di legge per lo smaltimento di materiali di consumo contaminati.



Panoramica della pulizia

Prodotto	Disinfezione con panno	Lavaggio disinfettante	Altro
custo cardio 100/110/130/300	X		
custo cardio 200/400 & elettrodi			S
custo screen 300/310/400/pediatric	X		
Bracciale mis. pressione sanguigna			S
custo flash 500/510/510V/501/501L	X		
custo watch	X		
custo kybe	X		
custo guard 1/3	X		
custo guard holter	X		
custo belt 1/3		X	
custo belt extender		X	
Cavo ECG custo guard 3/Adattatore cavo	X		
custo spiro mobile			S
Borse per il trasporto, cinture per il trasporto, cinghie per la nuca		X	

S Richiesto trattamento speciale - maggiori informazioni sono riportate nelle istruzioni per l'uso

Dati di contatto del produttore:

custo med GmbH
Maria-Merian-Straße 6
85521 Ottobrunn
Germania

Telefono: +49 (0) 89 710 98 - 00
Fax: +49 (0) 89 710 98 - 10
E-mail: info@customed.de
Internet: www.customed.de

