

Herstellerinformation „CodeMeter“

Die Lizenzverwaltung von custo diagnostic 4.x erfolgt über das Softwareschutzsystem „CodeMeter“ von der Firma WIBU-SYSTEMS AG.

WIBU-SYSTEMS AG hat eine Sicherheitsschwachstelle gemeldet
<https://www.wibu.com/de/support/security-advisories.html>

custo diagnostic wird in der Regel in geschlossenen medizinischen Netzwerken betrieben, bei denen niemand von außen Zugriff auf das CodeMeter-System hat. Sind Ihr Router, Firewall und die einzelnen Computer ausreichend gegen Fremdzugriff geschützt, besteht ein geringes Risiko.

WIBU-SYSTEMS AG hat unter <https://www.wibu.com/support/user/user-software.html> ein Update seiner Software bereitgestellt (CodeMeter User Runtime).

Falls Sie das Update durchführen möchten, ist es auf allen Rechnern, die mit custo diagnostic 4.x arbeiten (inkl. PC mit CodeMeter Dongle), einzuspielen. Sie können dies in Eigenregie tun, Ihren custo med Vertriebspartner oder Ihren EDV-Betreuer damit beauftragen. In der Regel ist dies über Fernwartung möglich.

10/2020

custo med GmbH
85521 Ottobrunn