

NEU

custo diagnostic 5.8

Das Sport-EKG ... was ist noch normal?




© custo·med
SICHERHEIT IN DER DIAGNOSTIK



NEU: custo diagnostic 5.8 *Sport-EKG als Option im Ruhe-EKG*

Durch funktionelle und strukturelle Adaptationen des Herzens sowie physiologische Anpassungen des vegetativen Nervensystems kann es bei Sportlerinnen und Sportlern zu trainingsbedingten Veränderungen des Ruhe-EKGs kommen. Diese EKG-Veränderungen können in diesem Fall diagnostische Schwierigkeiten bereiten.

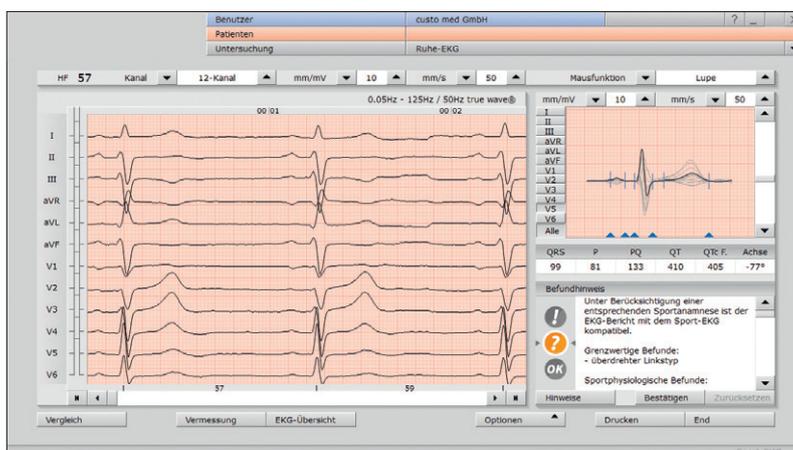


Das Sport-EKG als Option im Ruhe-EKG der neuen custo diagnostic 5.8

Es stellt sich die Frage: Was ist noch normal? Deshalb ist es das Ziel der Sport-EKG-Option in der custo diagnostic, zwischen sportbedingten physiologischen und pathologischen EKG-Veränderungen mittels eines Ampelsystems zu differenzieren. Hierbei werden nach den aktuellen Empfehlungen der ESC normale (trainingsbedingte) EKG-Veränderungen von Grenzbefunden und abnormalen (nicht-trainingsbedingten) und somit eventuell pathologischen EKG-Veränderungen abgegrenzt, die eine weiterführende Abklärung benötigen.



Mit der Sport-EKG-Option werden in der neuen custo diagnostic 5.8 bei Leistungssporttreibenden die Ergebnisse der automatischen Analyse anders bewertet als bei Menschen, die nicht in diese Kategorie fallen. Die Interpretation basiert auf den „International recommendations for electrocardiographic interpretation in athletes“ der ESC.

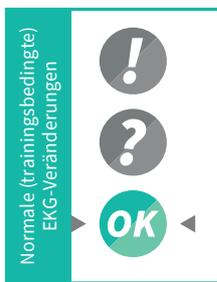

Das Kernstück des Sport-EKG-Moduls ist die übersichtliche Ampeldarstellung.

Ruhe- & Belastungs-EKG-System custo cardio 300

custo cardio 300 ist unser 12-Kanal-Ruhe- und Belastungs-EKG-System für den mobilen Einsatz. Durch den kabellosen Betrieb und die Möglichkeit, mit einem Gerät an mehreren Arbeitsstationen zu arbeiten, ist eine maximale Flexibilität garantiert. Nicht zuletzt dank der modularen Bedienbarkeit (diverse Patientenkabel, Anschluss an eine Sauganlage, etc.) ist custo cardio 300 die perfekte Lösung.



Ruhe- & Belastungs-EKG-System custo cardio 400/400 accu

custo cardio 400/400 accu setzt neue Maßstäbe in der Funktionalität, der Bedienbarkeit und der Hygiene. Dank der einfach wechselbaren, wiederverwendbaren Saugelektroden ist eine hygienische und nachhaltige Anwendung garantiert. Die Akku-Variante ist komplett autark und lässt sich kabellos in Ihr WLAN-Netz einfügen und ist somit flexibel einsetzbar.



Innovative Systemlösungen für Ihre Diagnostik


Unsere Marke steht seit 1982 für innovative Systemlösungen in der kardiopulmonalen Diagnostik. In Kooperation mit kompetenten Vertriebs- und Servicepartnern bieten wir professionelle Lösungen an und berücksichtigen dabei Ihre individuellen Gegebenheiten und IT-Strukturen. Ob stationär oder mobil, Einzelplatz oder standortübergreifende Netzwerklösung, Praxis oder Klinik – Ihr modulares custo med-System ist eine lohnende Investition in die Zukunft.

Unsere modulare Plattform custo diagnostic ist die intelligente Verbindung zwischen Medizintechnik und Verwaltungssoftware.



Besuchen Sie uns auf YouTube!

www.customed.de

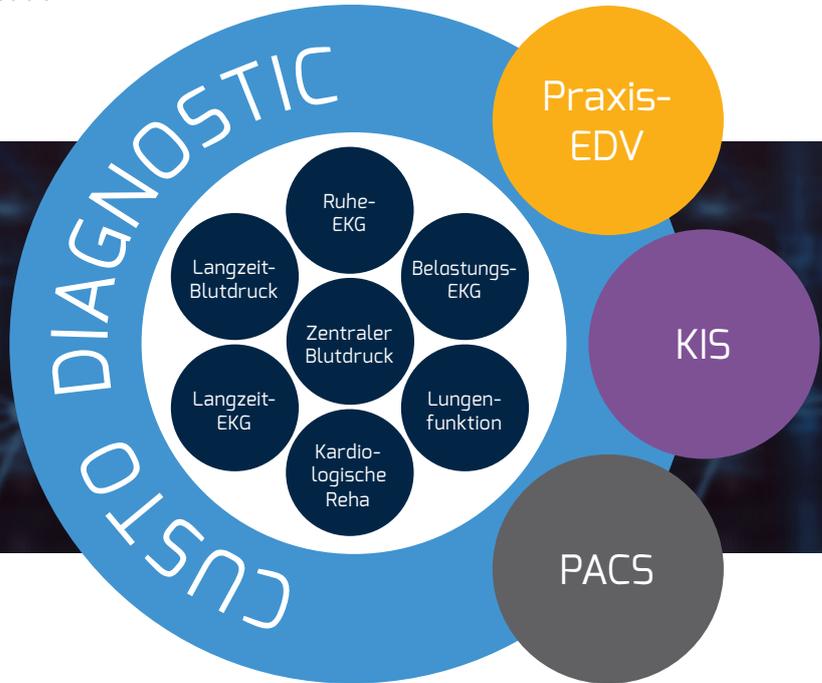

MEHR INFORMATIONEN

custo med GmbH • Maria-Merian-Straße 6 • 85521 Ottobrunn • Tel.: +49 (0) 89 710 98-00 • Fax: +49 (0) 89 710 98-10
E-Mail: info@customed.de • Bitte ausfüllen und an custo med faxen, schicken oder eingescannt per E-Mail senden.
Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.customed.de/kontakt nutzen.

Bitte senden Sie mir Ihren aktuellen Hauptkatalog zu.



MTS-02.23

Bitte senden Sie mir Informationsmaterial per Post / per PDF .

Ruhe-/Belastungs-EKG

Langzeit-EKG

Langzeit-Blutdruck

Lungenfunktion

Klinik-IT

Kardiologische Reha

Hygienetaschen „custo clean“

Praxis-/Klinik-Anschrift:

Name _____

Ansprechpartner _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____