

NUEVO

custo diagnostic 5.8

SPORT ECG...

¿Qué se sigue considerando normal?




© custo·med
EXCELLENCE IN DIAGNOSTICS




NUEVO: custo diagnostic 5.8 *SPORT ECG como opción en el ECG de reposo*

Las adaptaciones funcionales y estructurales del corazón, así como las adaptaciones fisiológicas del sistema nervioso autónomo, pueden provocar cambios relacionados con el entrenamiento en el ECG en reposo de los deportistas. Estos cambios en el ECG pueden causar dificultades diagnósticas en tal caso.

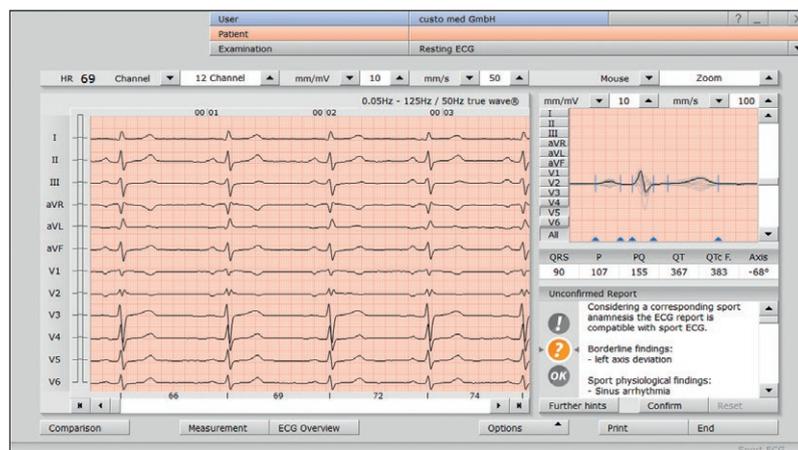


El SPORT ECG como opción en el ECG en reposo del nuevo custo diagnostic 5.8

Surge la pregunta: ¿Qué se sigue considerando normal? Por lo tanto, el objetivo de la opción de SPORT ECG en custo diagnostic es diferenciar entre los cambios fisiológicos y patológicos del ECG relacionados con el deporte mediante un sistema de semáforo. De acuerdo con las recomendaciones actuales de la ESC, los cambios normales (relacionados con el entrenamiento) del ECG se distinguen de los cambios límite y anormales (no relacionados con el entrenamiento) y, por tanto, posiblemente patológicos del ECG que requieren una mayor clarificación.

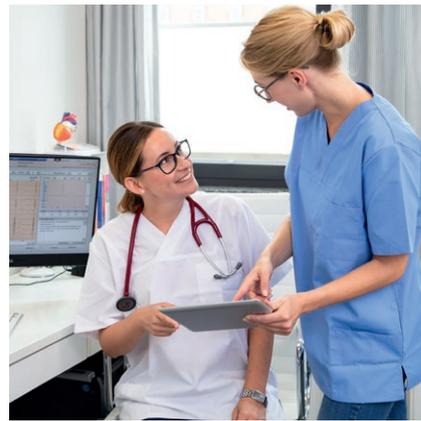

Con la opción de **SPORT ECG**, los resultados del análisis automático en el nuevo **custo diagnostic 5.8** se evalúan de forma diferente para los deportistas de competición que para las personas que no pertenecen a esta categoría. La interpretación se basa en las “Recomendaciones internacionales para la interpretación electrocardiográfica en deportistas” de la ESC.

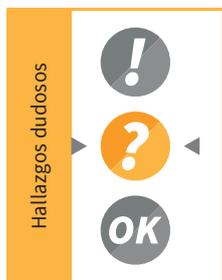

Rápida y clara visión tipo semáforo, la clave del módulo **SPORT ECG**.

ECG de reposo y de esfuerzo custo cardio 300

custo cardio 300 es nuestro ECG de reposo y esfuerzo de 12 canales para uso móvil. La máxima flexibilidad está garantizada gracias al funcionamiento inalámbrico y a la posibilidad de trabajar con una unidad en varios puestos de trabajo. Y no menos importante, custo cardio 300 es la solución perfecta gracias a su operatividad modular (varios cables de paciente, conexión a una unidad de aspiración, etc.).



ECG de reposo y de esfuerzo custo cardio 400/400 accu

custo cardio 400/400 accu establece nuevos estándares en funcionalidad, facilidad de uso e higiene. Gracias a los electrodos de succión reutilizables y fáciles de cambiar, se garantiza una aplicación higiénica y sostenible. La versión con batería recargable es completamente autosuficiente y puede integrarse de forma inalámbrica en su red WiFi, lo que hace que su uso sea flexible.



Soluciones de sistemas diagnóstico cardiopulmonar innovadoras desde hace más de 40 años.


Desde 1982, nuestra marca es sinónimo de soluciones de sistemas innovadores para el diagnóstico cardiopulmonar. En colaboración con socios de distribución y servicio competentes, ofrecemos soluciones profesionales y tenemos en cuenta sus circunstancias individuales y estructuras informáticas. Ya sean estaciones de trabajo fijas, móviles, individuales o en estructura de red multisitio, en su consulta o en entrono hospitalario, su sistema modular custo med es una inversión de futuro.

Nuestra plataforma modular de diagnóstico custo es el vínculo inteligente entre la tecnología médica y el software de gestión.



Visítenos en YouTube!

www.customed.de

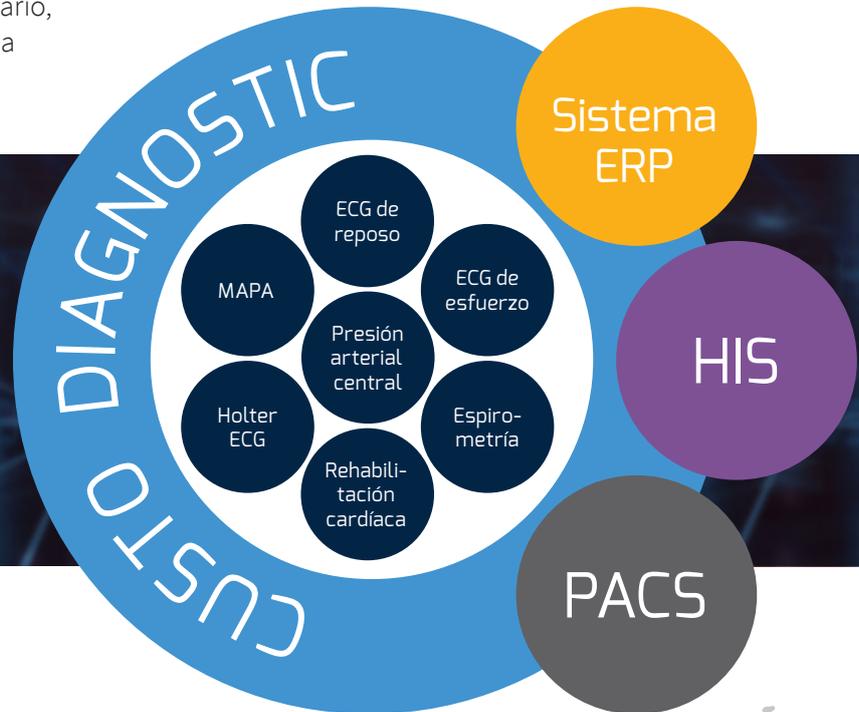

custo med – su distribuidor local

Contacto:

custo med LATAM SAS
Bogotá – Colombia
latam@customed.de
www.customedlatam.com

