

Waschanleitung custo belt

Washing Instructions custo belt



- Aufbereitung: desinfizierendes Waschen (bis zu 100 Waschzyklen)
- Empfohlenes Desinfektionswaschmittel: Eltra 40® (ECOLAB)
- Trocknung liegend, nicht hängend.
Erst nach vollständigem Trocknen dehnen bzw. verwenden.
- **Nach Verwendung an infektiösen Patienten nicht mehr verwenden!**

- Reprocessing type: Washing with a disinfecting agent (up to 100 washing cycles)
- Recommended disinfecting agent: Eltra 40® (ECOLAB)
- Lay flat to dry. Do not hang dry.
Allow to dry completely before stretching or using it.
- **Do not use after use on infectious patients!**

Waschanleitung custo belt

Washing Instructions custo belt



Maschinenwäsche 40°C im Waschnet, nicht schleudern
Machine wash 40°C in the washing net, no spin cycle



Nicht mit Bleiche behandeln
Do not bleach



Nicht bügeln
Do not iron



Nicht im Trockner trocken
Do not tumble dry